


## Montagevoorstel\*

### Hoekwandbeugel 90° 75x75cm 3 flenzen RVS gepolijst

### Artikelnummering:

1 10 750 (RVS gepolijst) / 1 10 750C (RVS wit)

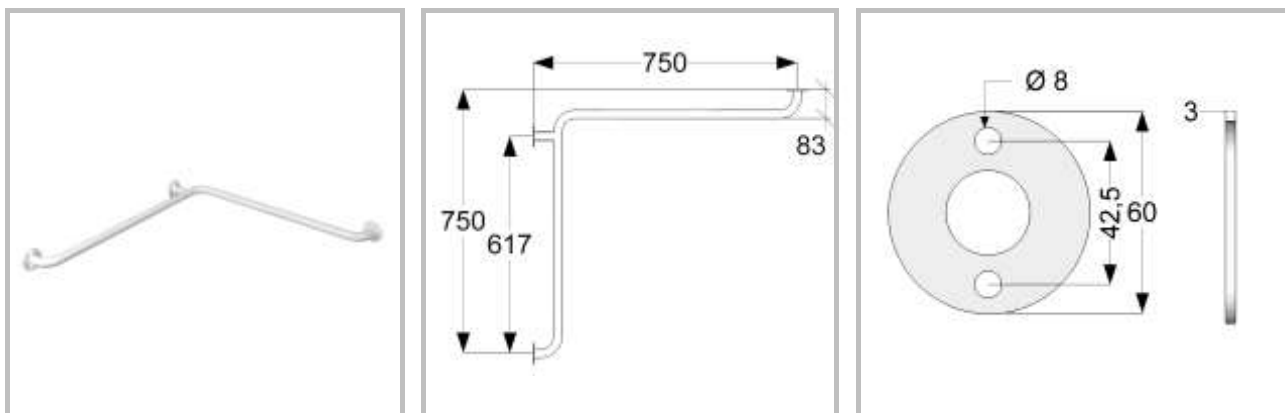

### Handgreep

**Opmerking: door het omdraaien van de wandbeugel is de middelste flens op 2 posities te bevestigen**

1. bepaal de juiste positie en teken de boorgaten af
2. breng voor de door u gekozen bevestigingsmaterialen boorgaten aan
3. zet de wandbeugel vast met de door u gekozen bevestigingsmaterialen voorzien van de meegeleverde kapringen

attentie: indien gekozen wordt voor montage met balkopschroeven dan heeft men geen kapringen en afdekkapjes te plaatsen

4. meegeleverde afdekkapjes aanbrengen

### Optioneel:



Op deze hoekhandgreep is de spons/flessenhouder 110500 eenvoudig, zonder te boren, aan te brengen en te verwijderen. Deze spons/flessenhouder is zowel zittend als staand goed te bedienen.

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.  
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

\* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.