


## Montagevoorstel \*

### Toiletbeugelset armlegger 30 cm hoog

#### Artikelnummering:

244005 (RVS gepolijst) / 244005C (RVS wit) / 244005SC (staal wit)

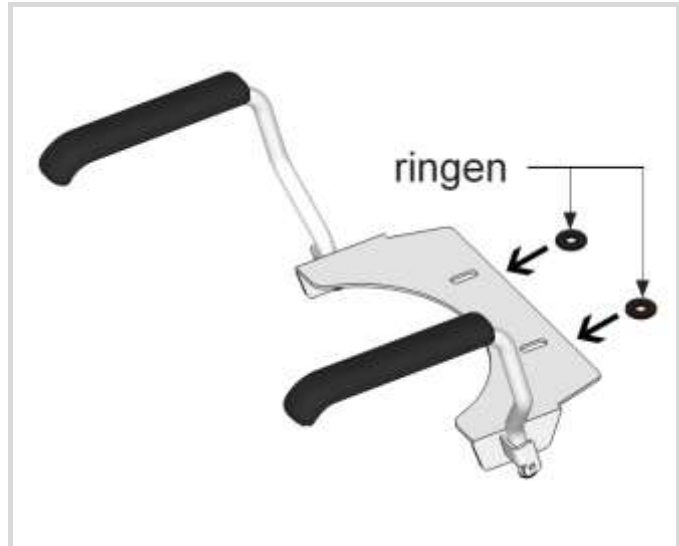

#### Opzetklem

1. Closet goed schoon en droog maken
2. Ringen op bevestigingsopeningen van closet leggen
3. Toiletbeugelset plaatsen en vastzetten

#### Tip voor de **gecoate** toiletbeugelsets:

- Breng de twee meegeleverde bescherm strips aan om beschadiging van de coating te voorkomen.
- Plaats de strips bovenaan de binnenzijde van de uitsparing van de gecoate armleggers, zie blauwe pijl afbeelding.



#### Tip:

- Bevestigingsset 970005(IN) voor het vervangen van kunststof materialen van toiletzitting
- Bevestigingsset 920003(IN) voor het vastzetten van toiletbeugelset wanneer een losse verhoger wordt aangebracht

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.  
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

\* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik