


Montagevoorstel *

Toiletbeugelset inclusief losse verhoger 5 cm

Artikelnummering:

244405 (RVS gepolijst) / 244405C (RVS wit) / 244405SC (staal wit)

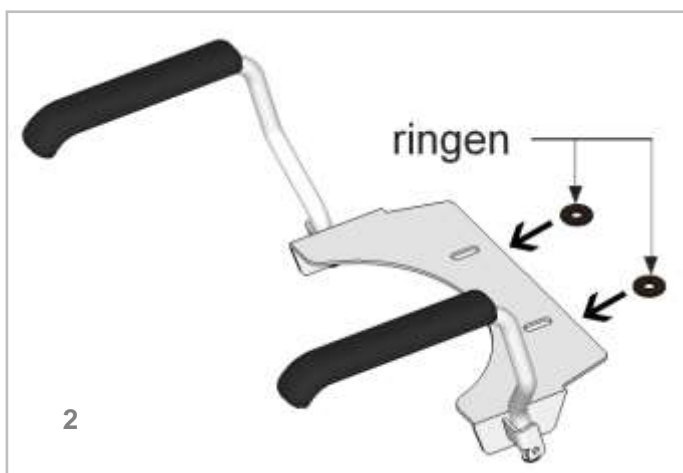


Toiletbeugelset

1. closet goed schoon en droog maken
2. zwart rubberen ringen plaatsen op de bevestigingsopeningen van het closet
3. opzetklem vastzetten met bijgeleverde bevestigingsset;
 - 2 bouten voorzien van kapring en kunststof ring aanbrengen in bevestigingsgaten
 - kunststofring aanbrengen
 - RVS volgring aanbrengen
 - 2 RVS moeren M8 aanbrengen en vastdraaien

afdekkapjes op de bout aanbrengen

-

4. verhoger aanbrengen (zie gebruiksaanwijzing in verpakking verhoger)

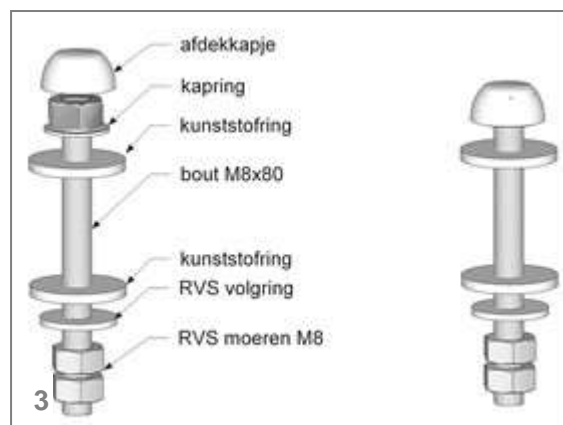

Tip voor de **gecoate** toiletbeugelsets:

- Breng de twee meegeleverde bescherm strips aan om beschadiging van de coating te voorkomen.
- Plaats de strips bovenaan de binnenzijde van de uitsparing van de gecoate armliggers, zie blauwe pijl afbeelding.



Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep. Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.