

Montagevoorstel * serie 125


Beugel blinde bevestiging deur, kozijn en wand



Artikelnummering:

125020(C/SC)/125030(C/SC)/125040(C/SC)/125050(C/SC)/125060(C/SC)/125070(C/SC)/125080(C/SC)/125100(C/SC)/125150(C/SC)

6 cijferig nummer = RVS gepolijst / 6 cijferig nummer+C = RVS wit / 6 cijferig nummer+ SC = staal wit

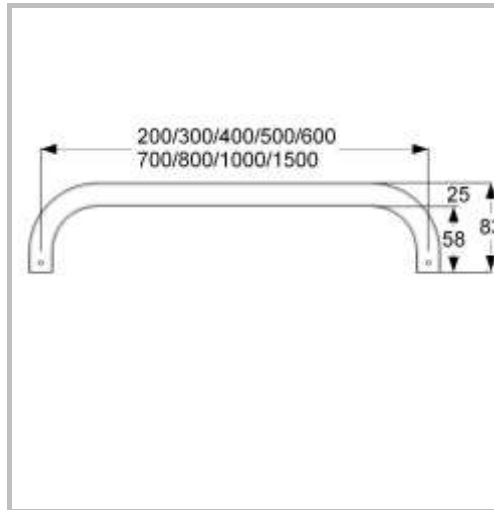

Beugel blinde bevestiging

1. plaats van beugel bepalen
 2. de uiteinden van de buis rondom aftekenen
 3. breng in het hart van de afgetekende rondjes voor de door u gekozen bevestigingsmaterialen boorgaten aan
 4. zet de beugel vast met de bevestigingsmaterialen
- beugels met verdekte bevestiging worden veelal vastgezet met (stok)draadeinden, zie onze website voor de diverse bevestigingssets

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep. Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik