



- JadaCare hoogte verstel rail-in systemen om hulpmiddelen in hoogte te stellen
- snel en eenvoudig aan te brengen
- in combinatie met spangrepen leverbaar
- eenvoudig te reinigen
- verkrijgbaar voor toiletbeugels | douchezittingen | wastafels
- elektrisch verstelbare rails voor douchezittingen (sta-op) en wastafels leverbaar

Specificaties

540040(C) Rail-in systeem toiletbeugels

- leverbaar in RVS gepolijst en wit - 540040(C)
- geschikt voor alle JadaCare toiletbeugels
- beugels zijn 15 cm hoogte instelbaar
- toiletbeugel is in de rail opklapbaar en in op staande stand beremd
- gebruikersgewicht tot 200 kg per beugel



Toepassing

- indien de toiletbeugel eenvoudig, zonder boren, hoogte instelbaar moet zijn. Een indicatiewijziging of een andere gebruiker kan om een andere ondersteuningshoogte vragen, hierbij biedt een rails de mogelijkheid dit zonder boren te regelen.



Optioneel

- indien geen toiletbeugel is aangebracht kan de rail worden afgedekt met een afdekplaat* welke in de rail wordt geschoven
- de rail kan ook worden afgedekt met een sierkap*. Deze wordt over de rail geplaatst.
- indien er in plaats van de standaard mee geleverde inbusbout een spangreep wordt aangebracht is de beugel eenvoudig zonder gereedschap hoogte instelbaar
- ook wanneer een steunpoot is aangebracht, kan de toiletbeugel in een rail worden aangebracht en blijft deze opklapbaar



* zowel de afdekplaat als de sierkap zijn leverbaar in RVS gepolijst, RVS wit en diverse RAL kleuren

Specificaties

5 20 040(C) Rail-in systeem douchezittingen

- leverbaar in RVS gepolijst en wit
- geschikt voor alle JadaCare douchezittingen
- douchezittingen zijn 23 cm hoogte instelbaar
- douchezitting is in de rail opklapbaar
- gebruikersgewicht tot 150 kg

Toepassing

- situaties waarin een douchezitting eenvoudig, zonder boren, hoogte instelbaar dient te zijn. Bijvoorbeeld een indicatiewijziging of een andere gebruiker welke om een andere zithoogte vraagt

Optioneel

- indien geen douchezitting wordt aangebracht kunnen de rails worden afgedekt met afdekplaten welke in de rails worden geschoven
- de rails kunnen ook worden afgedekt met sierkappen. Deze worden over de rails geplaatst en zijn leverbaar in RVS gepolijst of wit en in iedere gewenste RAL kleur
- een steunpotenset kan worden aangebracht onder een douchezitting welke in het rail-in systeem is aangebracht. De steunpotenset klapt automatisch met het zitdeel mee omhoog.



3 50 000 rail elektrisch hoog/laag douchezittingen

- leverbaar in RVS gepolijst 50 cm hoogte instelbaar
- geschikt voor alle JadaCare douchezittingen (exclusief)
- inclusief handbediening
- gebruikersgewicht tot 150 kg

Toepassing

- indien de douchezitting frequent eenvoudig en snel in hoogte instelbaar moet zijn
- als sta-op douchezitting toe te passen zodat gebruiker eenvoudig kan gaan zitten en opstaan
- ontlast de zorgverleners
- in combinatie met een tillift te gebruiken



6 60 000 rail elektrisch hoog/laag wastafels

- leverbaar in RVS gepolijst 50 cm hoogte verstelbaar
- voor (rolstoel)wastafels met een hart op hart maat van 28 cm
- inclusief handbediening
- op de spiegelplaat kan een spiegel (exclusief) worden aangebracht

Toepassing

- indien de wastafel frequent eenvoudig en snel in hoogte instelbaar moet zijn. Bijvoorbeeld wanneer meerdere gebruikers gebruik maken van dezelfde wastafel en deze een andere gebruikershoogte vragen



6 50 060 / 6 50 065 Rail-in systeem wastafels

- leverbaar in RVS gepolijst en wit
- geschikt voor wastafels (exclusief) met een breedte van 60 of 65 cm en een hart op hart bevestigingsmaat van 28 cm
- de wastafel is 34 cm in hoogte stelbaar
- instelbaar met inbusbout of inbus kartelknop



Toepassing

- indien de wastafel eenvoudig in hoogte instelbaar moet zijn. Een indicatie wijziging of andere gebruiker kan tot een andere hoogte leiden

999107 wastafel verstelset

- leverbaar in RVS gepolijst
- voor (rolstoel)wastafels met een hart op hart maat van 28 cm
- de wastafels zijn 21 cm hoogte instelbaar
- royale planchet om toilet artikelen binnen handbereik te hebben
- met groef in achterzijde planchet om spiegel (exclusief) in aan te brengen



Toepassing

- indien de wastafel in hoogte instelbaar dient te zijn. Door een indicatiewijziging of andere gebruiker kan om een andere hoogte nodig zijn

Optioneel

- tevens kan er een handdouchehouder worden aangebracht zodat de handdouche binnen handbereik is om bijvoorbeeld het haar te wassen.



Douchekraan verstelset 999103 / 999109

- respectievelijk 17 en 43 cm hoogte instelbaar
- leverbaar in RVS gepolijst
- geschikt voor diverse douchekranen (exclusief) welke op het montagebord aangebracht worden
- instelbaar met inbusbout of inbus kartelknop

Toepassing

- indien de douchekraan hoogte instelbaar moet zijn. Deze verstelset is geschikt voor een zittende en staande gebruiker. Een indicatiewijziging of andere gebruiker kan tot een andere kraan hoogte leiden.

Aandachtspunt

- de hoogte verstelling vraagt om een flexibele slangen aansluit set

