

Montagevoorstel * serie 180

Rozetten voor wandbeugels & glijstangen



Artikelnummering:

1 58 000 / 1 58 100 / 1 59 000 / 1 59 400



Rozetten voor handgreep/glijstang

1. rozet en klemnok om de wandbeugel of glijstang aanbrengen
2. klemnok naar de binnenkant van de rozet schuiven en deze op de nokjes van de rozet drukken
3. rozet over de flens heen schuiven

OPMERKING:

Deze rozetten passen niet om de wit gecoate beugels en stangen!

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik