


Montagevoorstel *

Steunpoot voor toiletbeugels

Artikelnummering:

218000(C) (RVS gepolijst/gecoat)

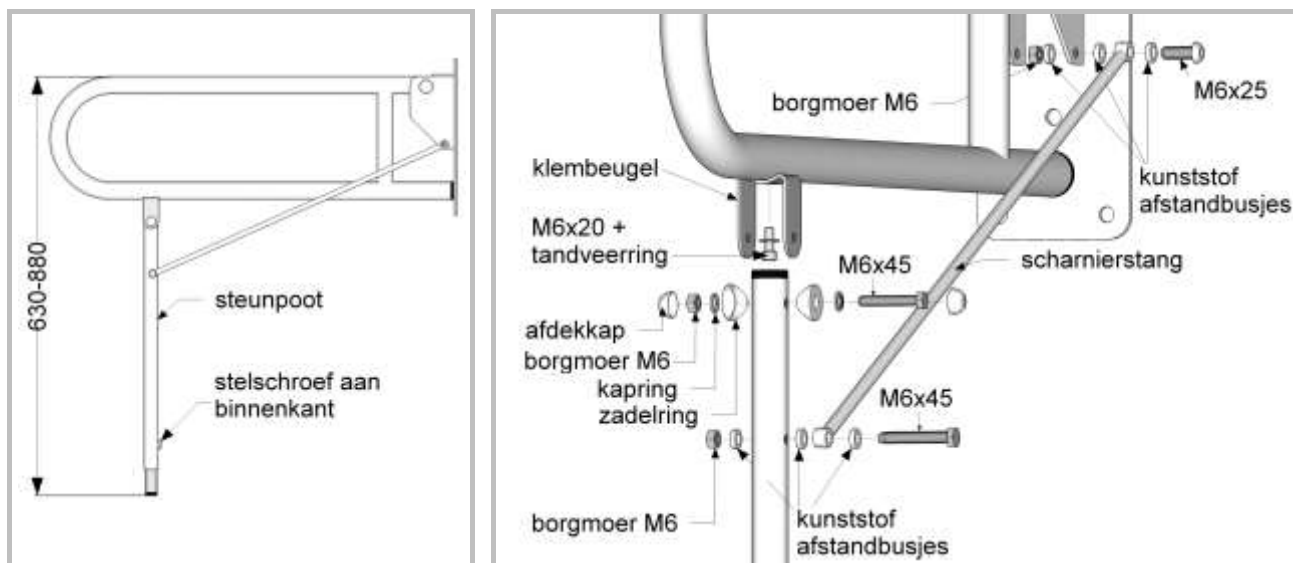

Steunpoot toiletbeugels vanaf 60 cm

1. - bevestigingsmateriaal klembeugel demonteren
- steunpoot uit de klembeugel halen
- afdichtingsdopje verwijderen uit de toiletbeugel
2. klembeugel aan toiletbeugel bevestigen met bout M6x20
tezamen met tandveerring
3. - steunpoot bevestigen aan klembeugel volgens tekening met M6x45
- attentie: moer zover aandraaien dat het schroefdraad
van de bout gelijk komt met buitenkant borgmoer.
- afdekkapjes aanbrengen
4. scharnierstang, links of rechts, aan steunpoot en wandplaat bevestigen volgens tekening
met bouten M6x45 en M6x25

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.