


Montagevoorstel *

Steunpoot toiletbeugels 2012 vanaf 60 cm

Artikelnummering:

218000SC (staal wit)

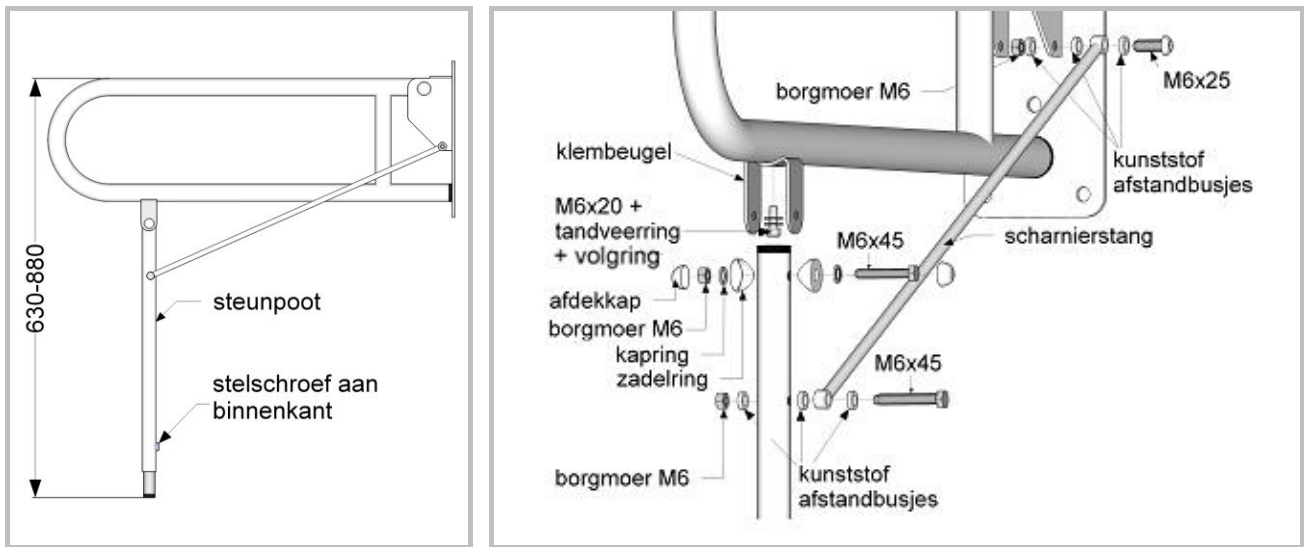

Steunpoot wandbeugels vanaf 60 cm

1. - bevestigingsmateriaal klembeugel demonteren
- steunpoot uit de klembeugel halen
- afdichtingsdopje verwijderen uit toiletbeugel
2. klembeugel aan toiletbeugel stevig bevestigen met bout M6x20 tezamen met tandveerring en volgring M6. (eerst tandveerring op bout daarna volgring)
3. - steunpoot bevestigen aan klembeugel volgens tekening met M6x45
- attentie: moer zover aandraaien dat het schroefdraad van de bout gelijk komt met buitenkant borgmoer.
- afdekkapjes aanbrengen
4. scharnierstang, links of rechts, aan steunpoot en wandplaat bevestigen volgens tekening met bouten M6x45 en M6x25

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik

Uitgave mrt-21