
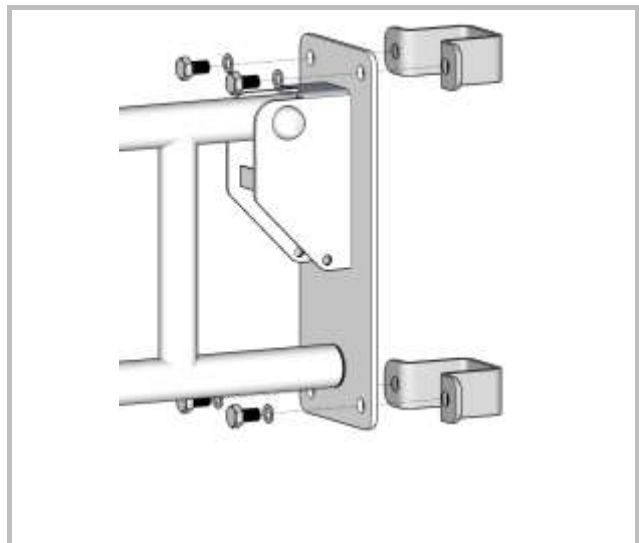


## Montagevoorstel \*

### Statief toiletbeugel


#### Artikelnummering:

220000 (RVS gepolijst) / 220000C (RVS wit) / 220000SC (staal wit)

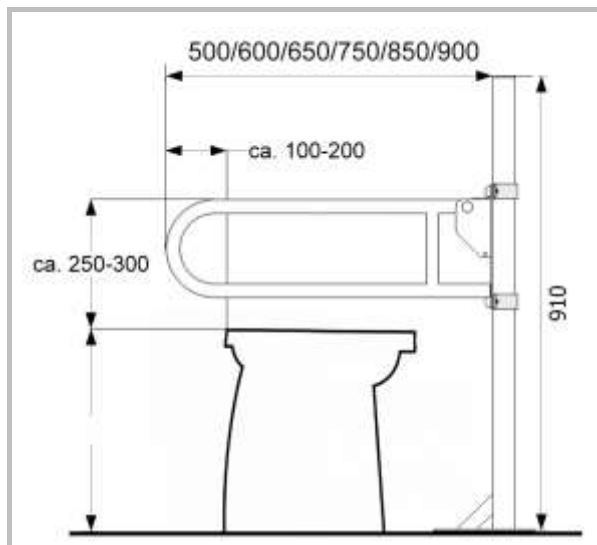

#### Statief wandbeugel

1. statief op de juiste plek op de vloer plaatsen  
(voorkant beugel ca. 10 - 20 cm voorbij voorkant zitsituatie zodat steun naast het standbeen is gesitueerd )
- 2 - teken de boorgaten af van het statief  
- breng voor de door u gekozen bevestigingsmaterialen boorgaten aan  
- zet het statief vast bevestigingsmaterialen voorzien van de meegeleverde kappingen  
- meegeleverde afdekkapjes aanbrengen
- 3 - bevestig de klembeugels losjes aan de toiletbeugel volgens tekening  
- toiletbeugel plaatsen op statief, bepaal de juiste hoogte ( bovenkant beugel ca. 25 - 30 cm boven zithoogte )  
- draai de bouten kruislings verder aan

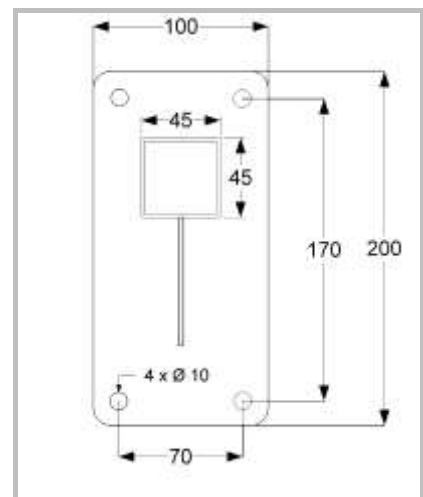

Opmerking: maximale hoogte bovenkant beugel 88 cm

\* Dit montagevoorstel is o.a. gebaseerd op gegevens uit het Handboek voor Toegankelijkheid.  
Het is raadzaam om ervaringsdeskundigen te raadplegen

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.

Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

\* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik