
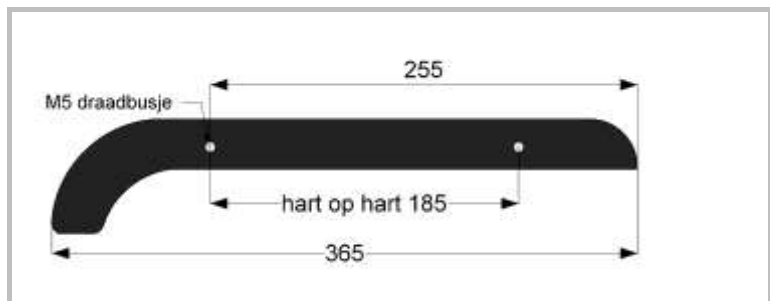


Montagevoorstel *

Armlegger kussen

Artikelnummering:

235000

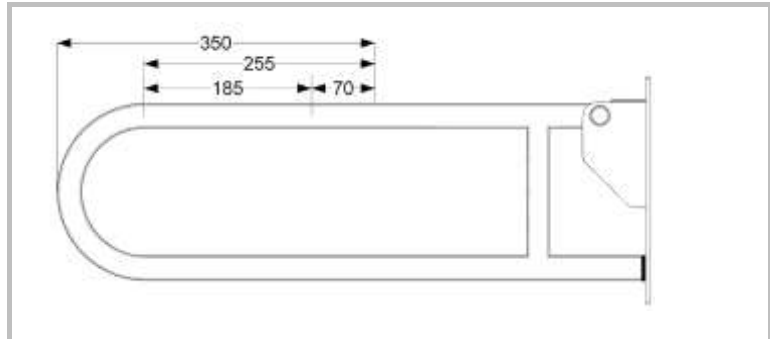

Armleggerkussen

1. Teken de positie van de 2 boorgaten af
2. Teken een streep op midden bovenkant buis, 350 mm vanaf voorkant buis (let op: loodrecht) zie tekening
3. Vanaf deze streep, teken af op midden bovenkant buis, 255 mm richting voorkant buis; dit is het eerste boorgat
4. Vanaf deze streep, teken af op midden bovenkant buis, 185 mm richting wandplaat; dit is het tweede boorgat
5. Boor nu de beide gaten met een 6,5 mm boor
6. Plaats het armleggerkussen op de buis en zet deze vast met de 2 bijgeleverde schroeven M5 x 40

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik