


Montagevoorstel *

Toiletbeugelset armlegger 25 cm hoog

Artikelnummering:

244000 (RVS gepolijst) / 244000C (RVS wit) / 244000SC (staal wit)

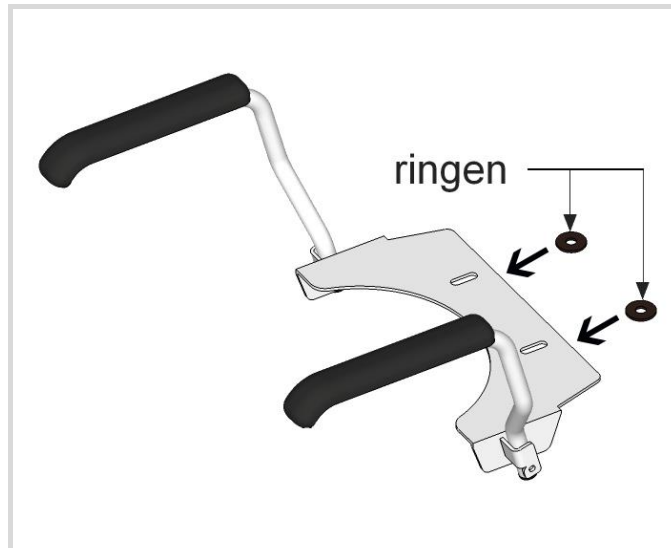

Opzetklem

1. Closet goed schoon en droog maken
2. Ringen op bevestigingsopeningen van closet leggen
3. Toiletbeugelset plaatsen en vastzetten

Tip voor de **gecoate** toiletbeugelsets:

- Breng de twee meegeleverde bescherm strips aan om beschadiging van de coating te voorkomen.
- Plaats de strips bovenaan de binnenzijde van de uitsparing van de gecoate armleggers, zie blauwe pijl afbeelding.



- Bevestigingsset 970005(IN) voor het vervangen van kunststof materialen van toiletzitting
- Bevestigingsset 920003(IN) voor het vastzetten van toiletbeugelset wanneer een losse verhooger wordt aangebracht

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik

Uitgave mrt-21