
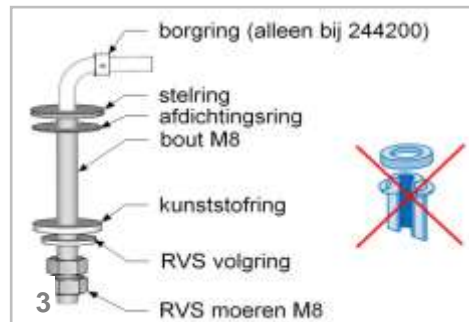


Montagevoorstel *

Toiletbeugelset inclusief zitting en deksel

Artikelnummering:

244200 (RVS gepolijst) / 244200C (RVS wit) / 244200SC (staal wit) WITTE ZITTING + DEKSEL
244210 (RVS gepolijst) / 244210C (RVS wit) / 244210SC (staal wit) ZWARTE ZITTING + DEKSEL

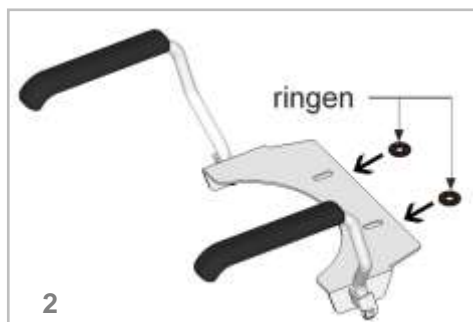

Toiletbeugelset

1. Closet goed schoon en droog maken
2. Zwart rubberen ringen plaatsen op de bevestigingsopeningen van het closet
3. Toiletzitting met opzetklem vastzetten met bijgeleverde bevestigingsset;
 - 2 RVS bouten, samen met afdichtingsring, aanbrengen door bevestigingsopeningen in het closet
 - op iedere bout een kunststof volgtring plaatsen
 - RVS volgtring plaatsen
 - 2 RVS moeren M8 aanbrengen en vastdraaien



ATTENTIE: Overige kunststofbevestiging niet gebruiken! Zie tekening.

4. Mocht de toiletzitting vooraan geen vloeiende aansluiting hebben op het closet dan kan deze d.m.v. de stelring verticaal versteld worden totdat deze goed aansluit

Tip voor de **gecoate** toiletbeugelsets:

- Breng de twee meegeleverde bescherm strips aan om beschadiging van de coating te voorkomen.
- Plaats de strips bovenaan de binnenzijde van de uitsparing van de gecoate armleggers, zie blauwe pijl afbeelding.



Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep. Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en/of gebruik.