


Montagevoorstel *

Toiletbeugelset inclusief zitting en deksel




Artikelnummering:

244210 (RVS gepolijst) / 244210C (RVS wit) / 244210SC (staal wit) ZWARTE ZITTING + DEKSEL

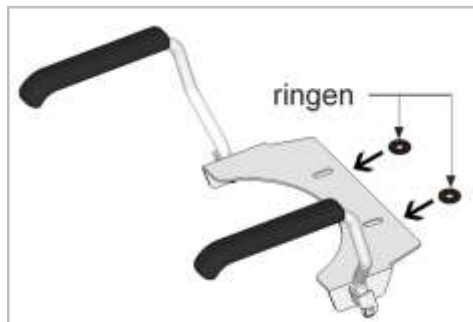

Toiletbeugelset

1. Closet goed schoon en droog maken
2. Zwart rubberen ringen plaatsen op de bevestigingsopeningen van het closet (tussen de plaat en het closet)
3. Toiletzitting met opzetklem vastzetten met meegeleverde bevestigingsset (zie afbeelding hiernaast);
 - 2 extra RVS moeren M6 aanbrengen en vastdraaien (dubbele moeren voorkomt het los raken van de zitting)

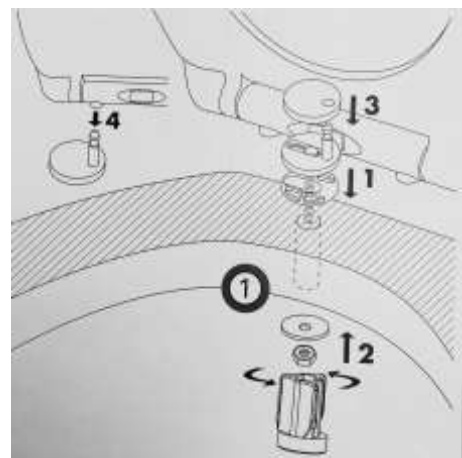

ATTENTIE:

4. Mocht de toiletzitting vooraan geen vloeiende aansluiting hebben op het closet dan kan deze d.m.v. de stelring verticaal veresteld worden totdat deze goed aansluit

Tip voor de **gecoate** toiletbeugelsets:

- Breng de twee meegeleverde bescherm strips aan om beschadiging van de coating te voorkomen.
- Plaats de strips bovenaan de binnenzijde van de uitsparing van de gecoate armleggers, zie blauwe pijl afbeelding.



Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep. Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.