


## Montagevoorstel \*

### Toiletbeugelset inclusief duozitting + deksel


#### Artikelnummering:

244306 (RVS gepolijst) / 244306C (RVS wit) / 244306SC (staal wit)

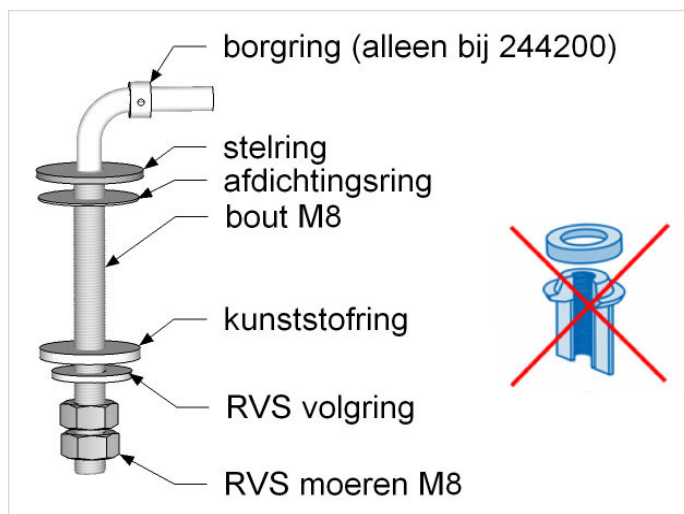

#### Toiletbeugelsets

1. closet goed schoon en droog maken
2. zwart rubberen ringen plaatsen op de bevestigingsopeningen van het closet
3. opzetklem met de toiletzitting vastzetten met bijgeleverde bevestigingsset;
  - 2 RVS bouten, samen met afdichtingsring, aanbrengen op bevestigingsopeningen
  - op iedere bout een kunststof volgring plaatsen
  - daarna RVS volgring plaatsen
  - 2 RVS moeren M8 aanbrengen en vastdraaien

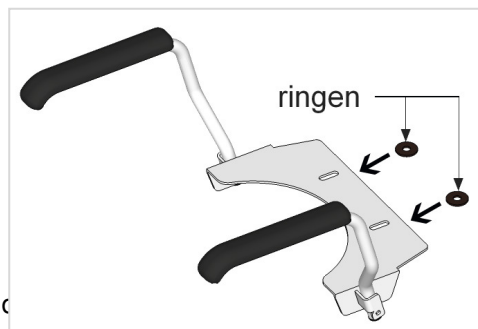

#### Tip:

- Optioneel closetrolhouder 249000(C/SC) zowel links als rechts onder de armleggers aan te brengen zodat er altijd toiletpapier binnen handbereik is!



Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep. Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

\* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en/of gebruik

Uitgave 2017