


## Montagevoorstel \*

### Toiletbeugelset inclusief losse verhoger 5 cm


#### Artikelnummering:

244410 (RVS gepolijst) / 244410C (RVS wit) / 244410SC (staal wit)

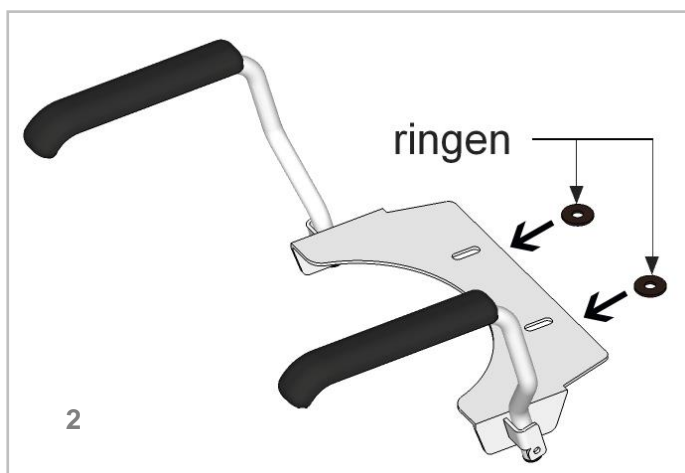

#### Toiletbeugelset

1. closet goed schoon en droog maken
2. zwart rubberen ringen plaatsen op de bevestigingsopeningen van het closet
3. opzetklem vastzetten met bijgeleverde bevestigingsset;
  - 2 bouten voorzien van kapring en kunststof ring aanbrengen in bevestigingsgaten
  - kunststofring aanbrengen
  - RVS volgtring aanbrengen
  - 2 RVS moeren M8 aanbrengen en vastdraaien
  - afdekkapjes op de bout aanbrengen
4. verhoger aanbrengen (zie gebruiksaanwijzing in verpakking verhoger)

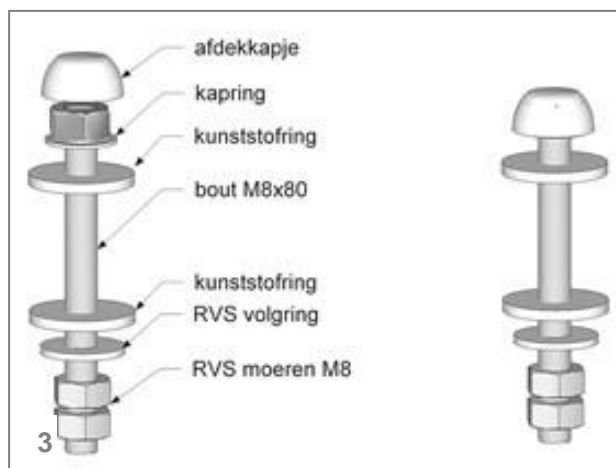

#### Tip voor de **gecoate** toiletbeugelsets:

- Breng de twee meegeleverde bescherm strips aan om beschadiging van de coating te voorkomen.
- Plaats de strips bovenaan de binnenzijde van de uitsparing van de gecoate armleggers, zie blauwe pijl afbeelding.



Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep. Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

\* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik

Uitgave mrt-21