


Montagevoorstel *

Toiletbeugelset met instelbare steunpoten

Artikelnummering:

244800 (RVS gepolijst) / 244800C (RVS wit)

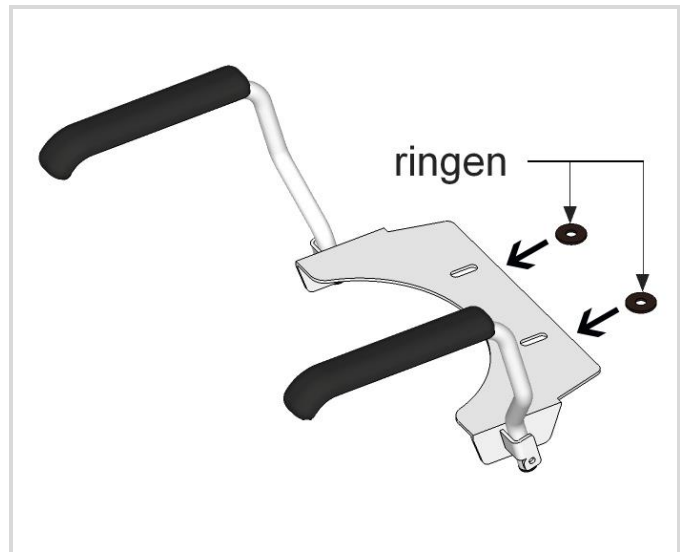


Opzetklem

1. Closet goed schoon en droog maken.
2. Ringen op bevestigingsopeningen van closet leggen.
3. Toiletbeugelset plaatsen en vastzetten.
4. De stelpoten op de gewenste hoogte vastzetten met inbusschroef en meegeleverde inbussleutel.

Tip voor de **gecoate** toiletbeugelsets:

- Breng de twee meegeleverde bescherm strips aan om beschadiging van de coating te voorkomen.
- Plaats de strips bovenaan de binnenzijde van de uitsparing van de gecoate armleggers, zie blauwe pijl afbeelding.

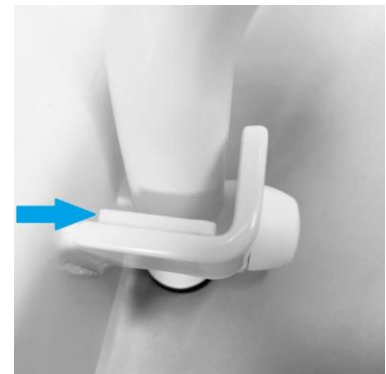

- Bevestigingsset 970005(IN) voor het vervangen van kunststof materialen van toiletzitting
- Bevestigingsset 920003(IN) voor het vastzetten van toiletbeugelset wanneer een losse verhooger wordt aangebracht

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.