


Montagevoorstel *

Closetrolhouder toiletbeugelsets en toiletsteunen

Artikelnummering:

249000 (RVS gepolijst) / 249000C (RVS wit) / 249000SC (staal wit)

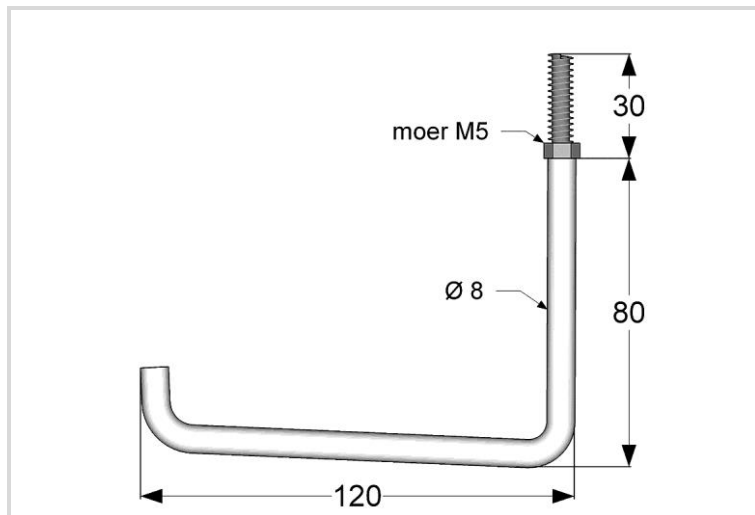

Closetrolhouder

1. achterste metaalschroef M5x30 uit de linker of rechter polyurethaan armlegger draaien
2. closetrolhouder aanbrengen door hier het draadeind van de closetrolhouder in te draaien tot aan de moer M5

Attentie: bij montage op een toiletbeugelset serie 244 en toiletsteun universeel serie 255, is het moertje M5 niet benodigd. Deze eerst verwijderen indien meegeleverd.

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.

