


Montagevoorstel *

Armsteun opklapbaar 70 cm

Artikelnummering:

250070 (RVS gepolijst) / 250070C (RVS wit) / 250070SC (staal wit)

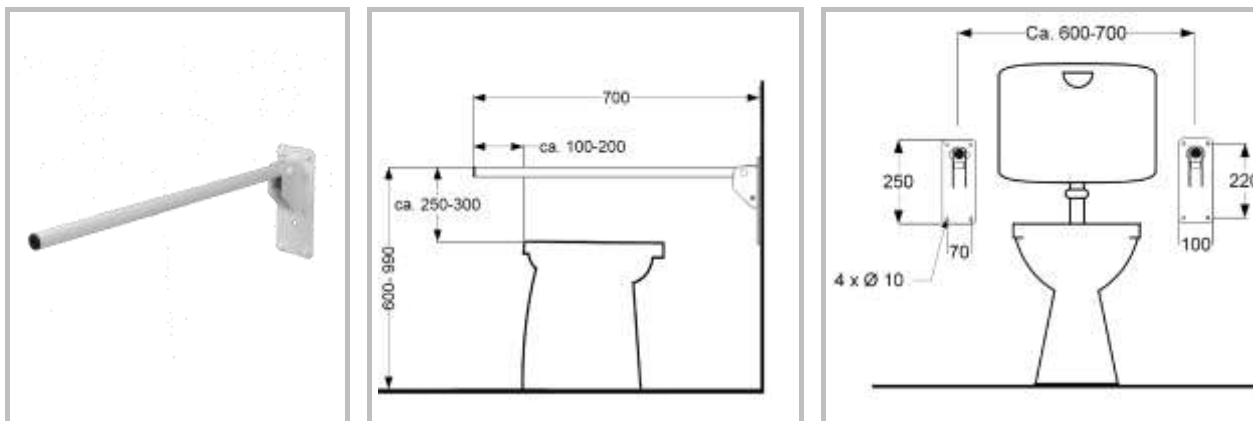

Armsteun 70 cm

1. bepaal de juiste hoogte
2. - teken de boorgaten af
- breng voor de door u gekozen bevestigingsmaterialen boorgaten aan
- zet de armsteun vast met de door u gekozen bevestigingsmaterialen voorzien van de meegeleverde kapringen
- meegeleverde afdekkapjes aanbrengen

* Dit montagevoorstel is o.a. gebaseerd op gegevens uit het Handboek voor Toegankelijkheid. Het is raadzaam om ervaringsdeskundigen te raadplegen

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep. Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.