


Montagevoorstel *

Toiletsteun universeel 4 verstelbare poten

Artikelnummering:

255000 RVS geglaspareld

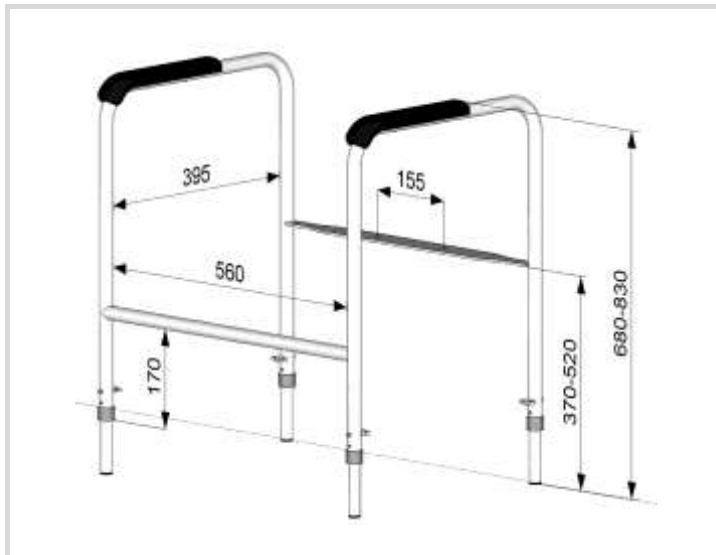

Toiletsteun universeel

1. closet goed schoon en droog maken
2. toiletsteun universeel op het closet plaatsen
3. de 4 stelpoten op de juiste hoogte instellen en vastzetten
(de stelpoten zijn op twee manieren in de steunpoten aan te brengen voor een zo groot mogelijk verstelbereik)

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik