


Montagevoorstel *

Toiletframe + verhoger 5 + 10 cm


Artikelnummering:

255300 + 255400 RVS geglaspareld | C RVS wit | SC (staal wit)

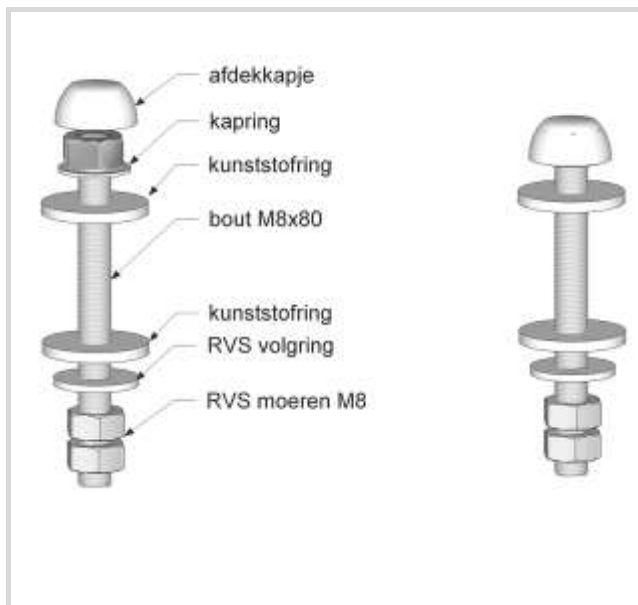

Toiletsteun universeel

1. closet goed schoon en droog maken
2. toiletsteun universeel op het closet plaatsen
3. de 4 stelpoten op de juiste hoogte instellen en vastzetten
(de stelpoten zijn op twee manieren in de steunpoten aan te brengen voor het groots mogelijke verstelbereik)
4. toiletsteun vastzetten met bijgeleverd bevestigingsset;
 - 2 bouten voorzien van kapring en kunststof ring aanbrengen in bevestigingsgaten
 - kunststofring aanbrengen
 - RVS volgring aanbrengen
 - 2 RVS moeren M8 aanbrengen en vastdraaien
 - afdekkapjes op de bout aanbrengen
5. verhoger aanbrengen (zie gebruiksaanwijzing in verpakking verhoger)

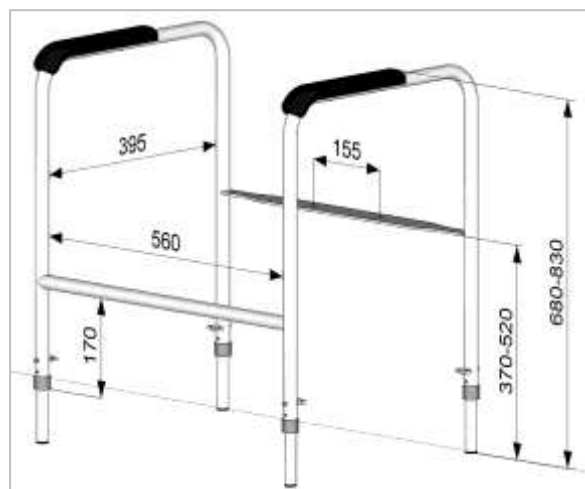

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.