


Montagevoorstel *

Armsteun opklapbaar 80 cm met steunpoot

Artikelnummering:

270080 (RVS gepolijst) / 270080C (RVS wit) / 270080SC (staal wit)

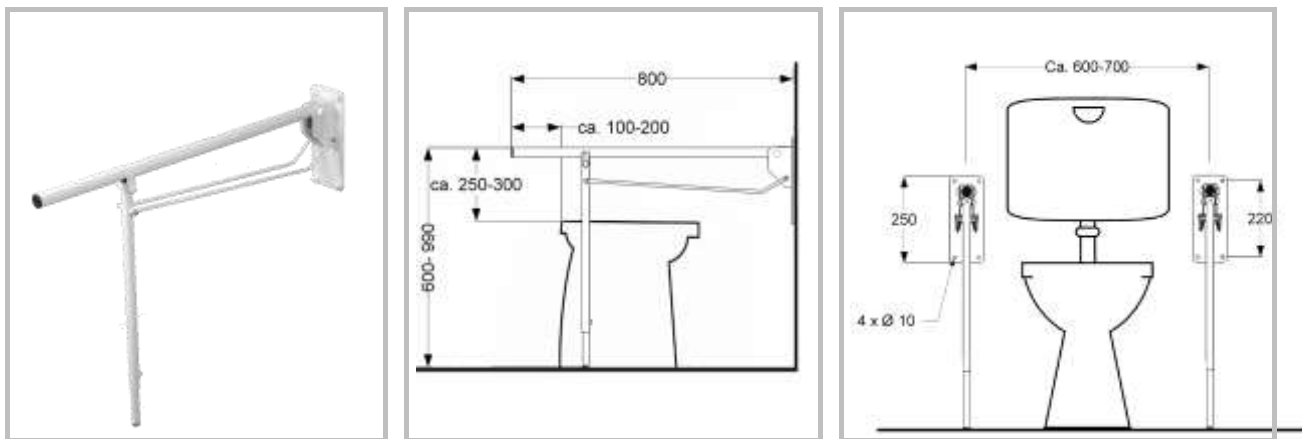

Armsteun met steunpoot

1. voorkant armsteun ca. 10 - 20 cm voorbij voorkant closet zodat steun naast het standbeen is gesitueerd
2. bepaal de juiste hoogte bovenkant armsteun tussen de 60 en 99 cm en ca. 25 - 30 cm boven closet
3. bepaal de juiste breedte tussen de armsteunen, ca. 60 - 70 cm hart op hart
4. - teken de boorgaten af van de armsteun
- breng voor de door u gekozen bevestigingsmaterialen boorgaten aan
- zet de armsteun vast met de door u gekozen bevestigingsmaterialen voorzien van de meegeleverde kapringen
- meegeleverde afdekkapjes aanbrengen

* Dit montagevoorstel is o.a. gebaseerd op gegevens uit het Handboek voor Toegankelijkheid. Het is raadzaam om ervaringsdeskundigen te raadplegen

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep. Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.