
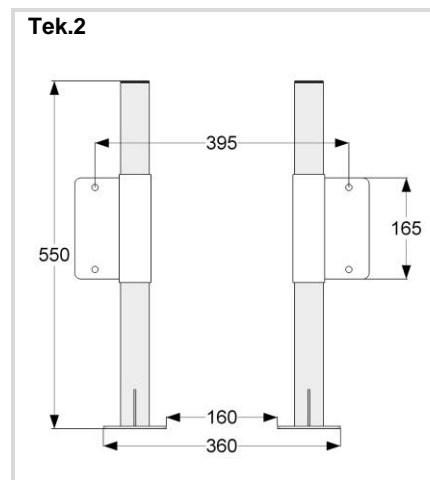


# Montagevoorstel \*

## Set statieven douchezitting

Artikelnummering:

330000 (RVS gepolijst) / 330000C (RVS wit) / 330000SC (staal wit)

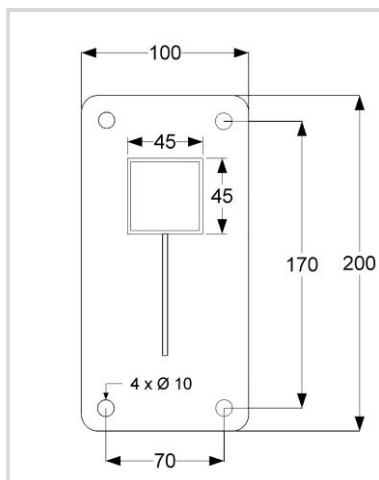


### Set statieven

1. Klemstatieven aan douchezitting bevestigen met kapringen en zeskantbouten m8x20 en borgmoeren M8, daarna afdekkapjes aanbrengen.

Attentie: douchezitting kan op 2 manieren aan klemstatieven bevestigd worden, zie tekening 2 en 3.

2. De douchezitting nu op de statieven plaatsen en de juiste plaats op de vloer bepalen.
3. - Teken de boorgaten af van de statieven.  
- Breng voor de door u gekozen bevestigingsmaterialen boorgaten aan.  
- Zet de statieven vast voorzien van de meegeleverde kapringen.  
- Meegeleverde afdekkappen aanbrengen
4. Juiste zithoogte bepalen en klemstatieven vastzetten met de 4 inbusbouten.

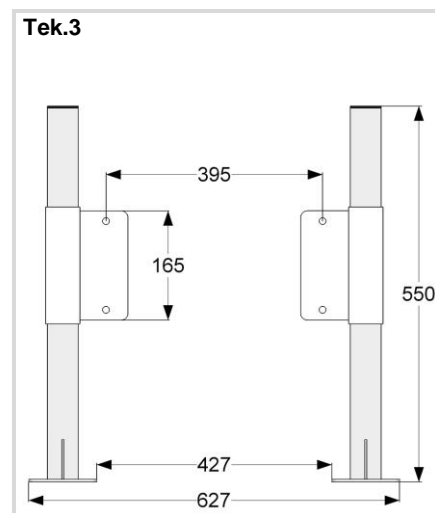

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.  
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

\* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik..

