


Montagevoorstel *

Steunpoot douchezitting t/m 2011

Artikelnummering:

335000 (RVS gepolijst)

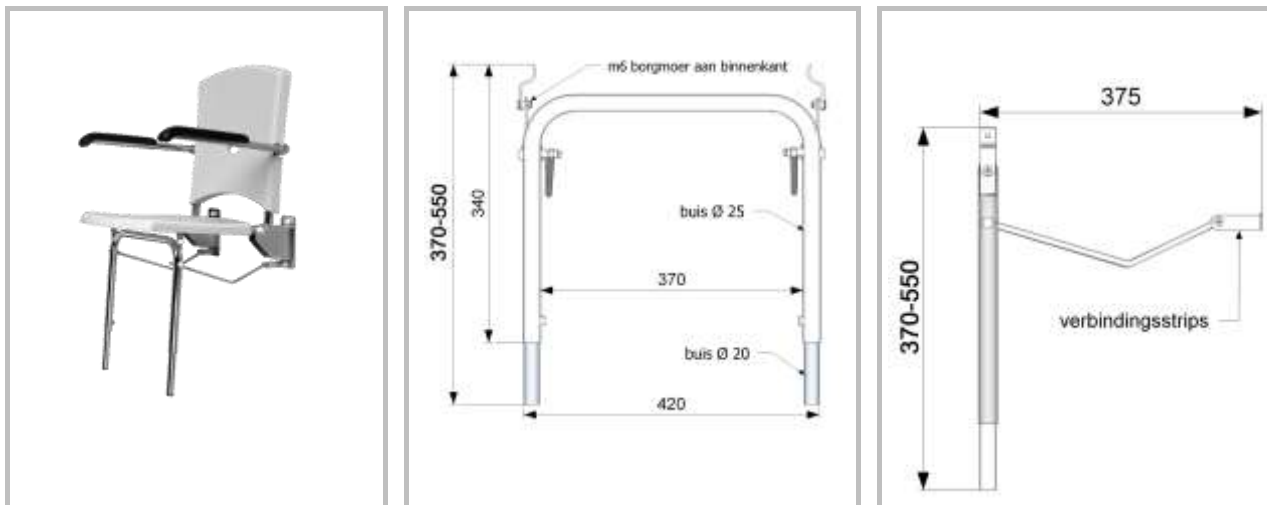

Steunpoot voor douchezitting 304/306/308 en 308100 (t/m 2011)

1. kunststof zitdeel verwijderen
2. attentie: voor steunpoot montage, minimale/maximale zithoogte douchezitting 37 en 55 cm
3. steunpoot bevestigen aan rvs zitdeel met 2 schroeven 6x35 en borgmoeren m6 (moeren m6 aan de binnenkant)
4. indien de douchezitting al bevestigd is; verwijder dan eerst de 2 onderste houtdraadbouten
 - indien douchezitting al bevestigd is in rail-in systeem, verwijder dan eerst de 2 onderste inbusbouten 8x25
 - indien douchezitting al bevestigd is op statieven, verwijder dan eerst de 2 onderste zeskantbouten m8x16.
5. verbindingsstrips worden aangebracht samen met de 2 onderste houtdraadbouten (of inbusbouten/zeskantmoeren) en kapringen van de douchezitting
6. afdekkapjes aanbrengen en kunststof zitdeel aanbrengen

Opmerking:

Bij installatie steunpoot in combinatie met rail-in systeem, is extra bevestigingsset 970019 benodigd indien het een oudere uitvoering rail-in betreft met het kleinere stelplaatje met 1 bevestigingsgat (bij de nieuwere stelplaten -levering vanaf januari 2011- met 2 bevestigingsgaten is dit niet meer nodig!)

Montagevoorstel *

Steunpoot douchezitting t/m 2011

Artikelnummering:

335000 (RVS gepolijst)

