
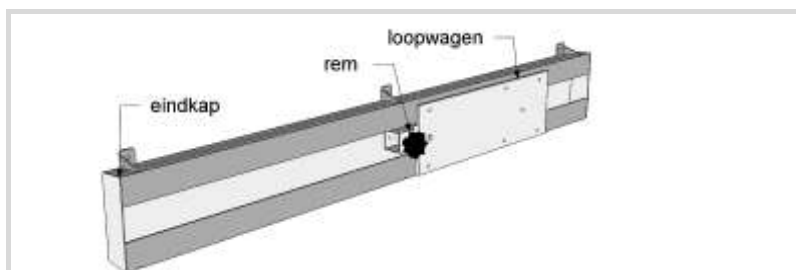


## Montagevoorstel \*

### Transferrail douchezitting

Artikelnummering:

355140 (RVS gepolijst)

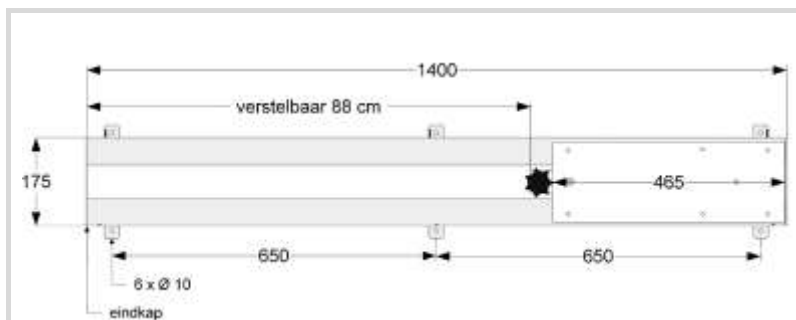

#### Transferrail

1. één van de eindkappen demonteren, en loopwagen voorzichtig uit rail halen
2. rail horizontaal op muur plaatsen (met de schoren naar boven)  
Let op! de rail dient op een vlakke wand gemonteerd te worden
3. - hoogte bepalen  
- teken de boorgaten af van de rail  
- breng voor de door u gekozen bevestigingsmaterialen boorgaten aan  
- zet de rail vast voorzien van de volgringen  
- afdekkappen aanbrengen
4. loopwagen voorzichtig in rail plaatsen, en eindkapje weer monteren
5. - douchezitting op loopwagen bevestigen met bijgeleverde zeskantbouten voorzien van de kapringen  
- daarna afdekkapjes aanbrengen
6. de rem aanbrengen in de draadbus van de loopwagen en deze zover aandraaien dat de loopwagen geblokkeerd wordt.

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.

Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

\* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.