
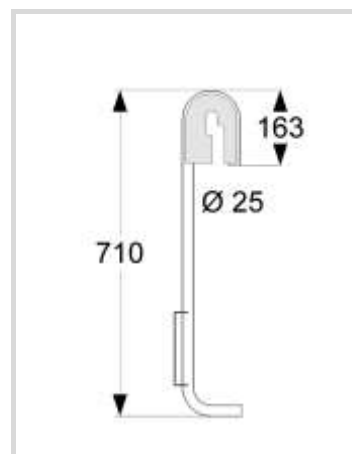


Montagevoorstel *

Frame voor hangende douchezitting

Artikelnummering:

370000 (RVS gepolijst)

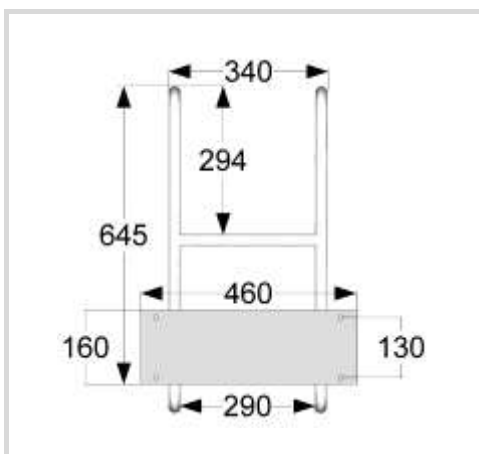

Frame hangende douchezitting vast

1. douchezitting aan frame bevestigen met de meegeleverde zeskantbouten M8x20 voorzien van kapringen en borgmoeren M8
2. afdekkapjes aanbrengen

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.