



## Montagevoorstel \*

Ophangframe 22 cm hoogte instelbaar voor douchezitting



Artikelnummering:

375000 (RVS gepolijst) / 375000C (RVS wit)

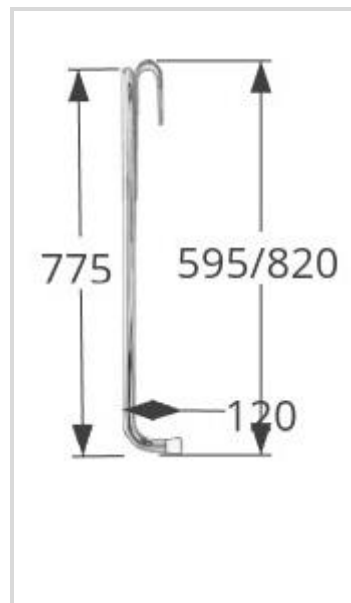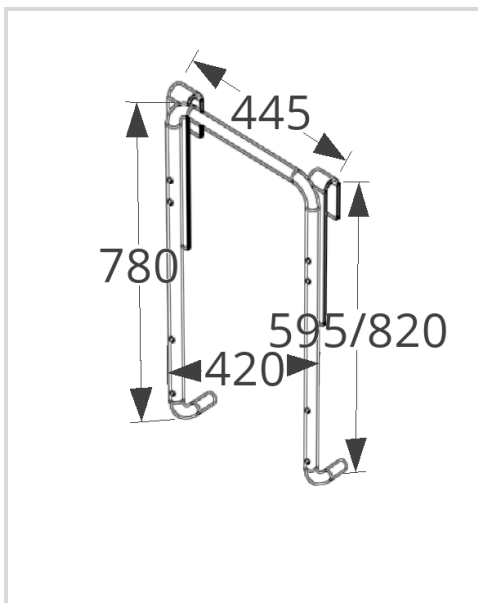

### Ophangframe hoogte instelbaar voor douchezittingen

1. douchezitting aan het frame bevestigen op de gewenste hoogte met de voormonteerde zeskantbouten M8x45 voorzien van kapringen en borgmoeren M8
2. het hangende frame is 22 cm hoogte instelbaar. Plaats de douchezitting op de juiste hoogte en draai de vier vleugelmoeren goed strak aan
3. witte afdekkappen aanbrengen
4. plaats het hangende frame met douchezitting voorzien van steunpotenset op de wandbeugel
5. controleer voor ieder gebruik of de vier vleugelmoeren strak aangedraaid zitten



Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.  
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

\* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik

Uitgave apr-21