

## Montagevoorstel \*

Douchestoel

Artikelnummering:

480000 (RVS geglaspareld) / 480000C (RVS wit)



### Douchestoel

1. Plaats een van de vier meegeleverde schroeven aan de bovenkant door een verzonken openingen van het zitdeel frame.
2. Breng een van de 4 meegeleverde zwarte afstandszadels aan om de schroef en steek de schroef door een opening van het onderstel en zet de schroef aan de onderzijde losjes vast met een meegeleverde moer.
3. Herhaal dit met de overige drie schroeven en draai alle vier moeren goed aan.
4. Breng het kunststoffen rug- en zitdeel aan.

\*Zit - en rugdeel zijn eenvoudig te verwijderen om schoon te maken.

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.  
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

\* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.