

## Montagevoorstel \*

Spangreep

Artikelnummering:

541040 / 542040



### Spangreep voor rail-in toiletbeugels

1. - Spangreep in de stelplaat draaien (zorg dat zowel de beugel als de stelplaat geheel onder in de rail staat zodat de openingen van de wandplaat en de stelplaat voor elkaar zitten).
2. - Draai de spangreep een stukje vast. Plaats het geheel op de gewenste hoogte en draai de spangreep verder aan.
3. - Plaats de hendel altijd omhoog, zie bovenstaande foto. Zo kan de neergaande beugel de hendel niet raken.
4. - De spangreep is eenvoudig los of vast te draaien door deze in te drukken of uit te trekken.

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.  
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

\* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.