


Montagevoorstel *

Set door & door bouten toiletbeugels/armsteunen

Artikelnummering:

585000 (RVS gepolijst) / 585000C (RVS wit)

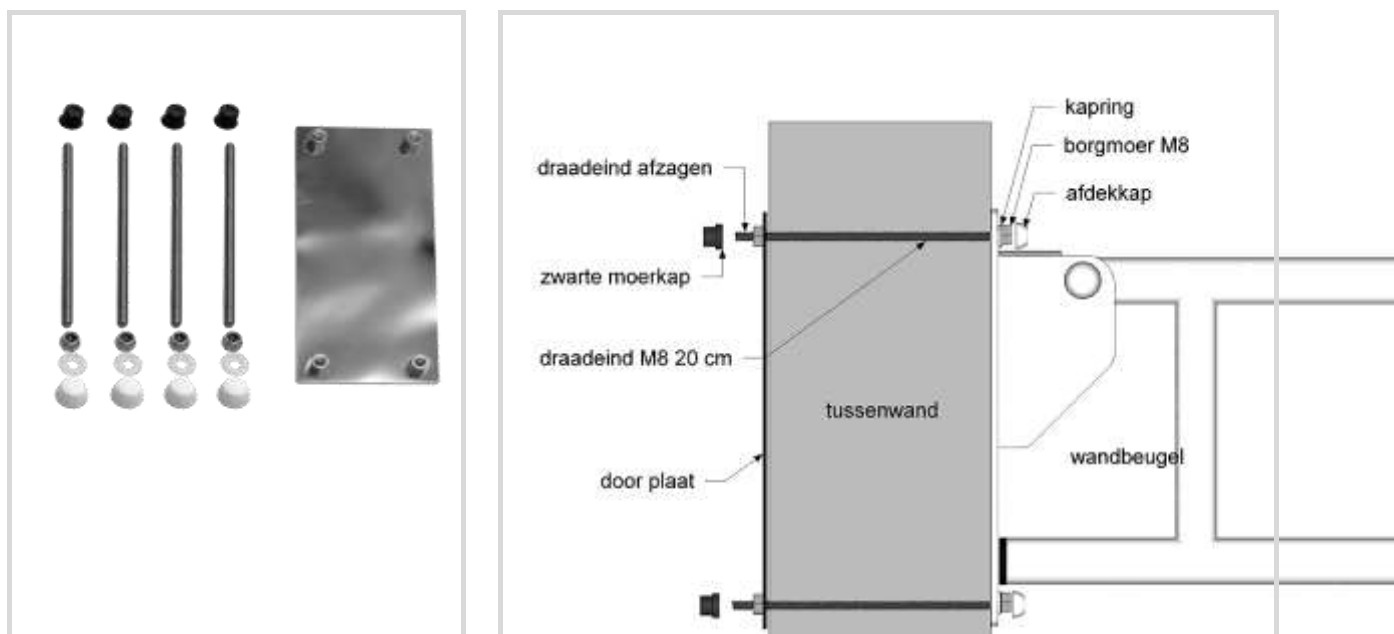

Set door & door bouten

1. gaten boren conform maatvoering wandbeugel/armsteun, boor \varnothing 10 mm
2. draadeinden voorzien van kapringen en borgmoeren M8 (draadeind net iets door de borging)
3. draadeinden door de gaten van de wandplaat steken en in de muur schuiven
4. aan de andere zijde de doorplaten op de draadeinden zetten en deze zover mogelijk erin draaien en goed vastzetten
5. uitstekende draadeind afzagen en witte moerkap aanbrengen
6. afdekkapjes op de wandplaat aanbrengen

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.