


## Montagevoorstel \*

### Rail-in elektrisch met spiegelhouder

#### Artikelnummering:


660065 (RVS gepolijst)

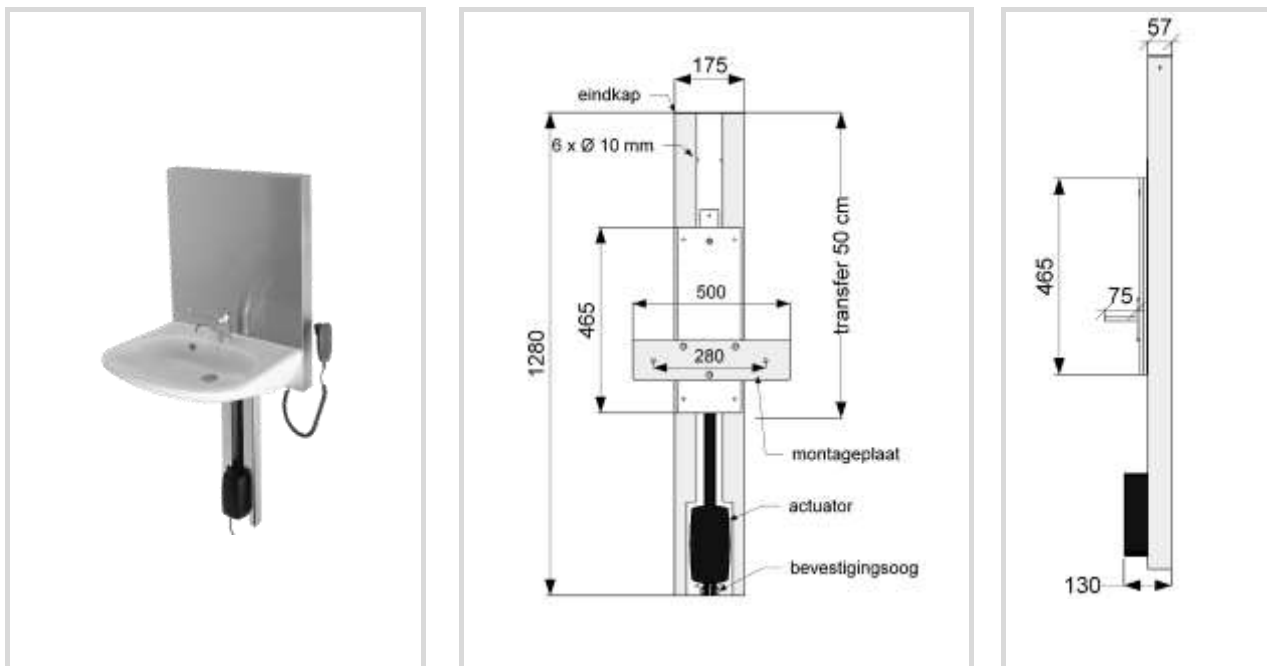

Wij adviseren u dit montagevoorstel eerst geheel door te nemen alvorens te beginnen met de installatie

#### Aandachtspunten installatie en aansluiting

- De O-ringen van de handbediening en actuator dienen voorzien te worden van zuurvrije vaseline bij aansluiting in de controlebox. Periodiek checken en verversen is noodzakelijk
- De output van de controlebox is 24 volt, derhalve is aansluiting met randaarde niet noodzakelijk
- De Nen norm 1010 dient in acht genomen te worden
- De producten mogen alleen in een omgeving worden gebruikt die correspondeert met hun IP-beschermingsklasse

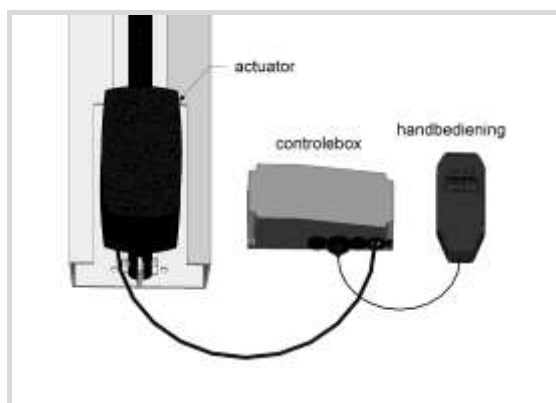

Onze producten zijn voorzien van de beschermingsklasse

**IP-6**, wat overeenkomt met de volgende toegestane reinigingsinstructie:

- Wassen met een borstel en water. Het water mag onder druk staan maar niet gereinigd worden met een hogedrukreiniger.

Optionele verkrijgbare artikelen:

- Verlengkabel actuator, artikelnummer 9 70 015
- Verlengkabel handbediening, artikelnummer 9 70 014

(vervolg op pagina 2)



## Montagevoorstel \*

### Rail-in elektrisch met spiegelhouder

#### Artikelnummering:

660065 (RVS gepolijst)

1. eindkap demonteren door losdraaien 2x m6x20
2. kabelbandjes verwijderen en loopwagen voorzichtig uit de rail halen
3. rail loodrecht tegen de muur plaatsen en hoogte bepalen (rail minimaal 2 cm vanaf de vloer, dan is minimale zithoogte 42 cm),  
Attentie: de rail dient op een vlakke wand gemonteerd te worden
4. - teken de boorgaten af van de rail  
- breng voor de door u gekozen bevestigingsmaterialen boorgaten aan  
- zet de rail vast voorzien van de volgringen  
- afdekkappen aanbrengen
5. actuator (motor) onderaan de rail bevestigen met zeskantbout m8x35 met volgringen en borgmoer m8.  
Opmerking: deze bevinden zich al aan het bevestigingssoog
6. kabel voor de voeding aansluiten op de controlebox. kabel van de handbediening aansluiten op de controlebox en stekker in stopcontact plaatsen
7. spindel van de actuator helemaal uitdraaien met behulp van de handbediening
8. nu de binnenzeskantbout m8x60 en tandveerring uit de loopwagen draaien en de loopwagen voorzichtig in de rail laten zakken over de spindel heen, met het bevestigingssoog naar boven gericht
9. nu de binnenzeskantbout met tandveerring weer in de loopwagen draaien en door het oog van de zuigerstangkop draaien en vastzetten met de bijgeleverde inbussleutel
10. eindkap weer monteren met de 2x m6x20
11. montageplaat op de loopwagen monteren met 3 binnenzeskantbouten m8x16 en de 4 volgringen
12. spiegelkap op de montageplaat plaatsen, wastafel plaatsen en vastzetten met de 2 kunststof borgringen, RVS volgringen en de moeren M8
13. spiegel (niet meegeleverd) op de spiegelkap aanbrengen

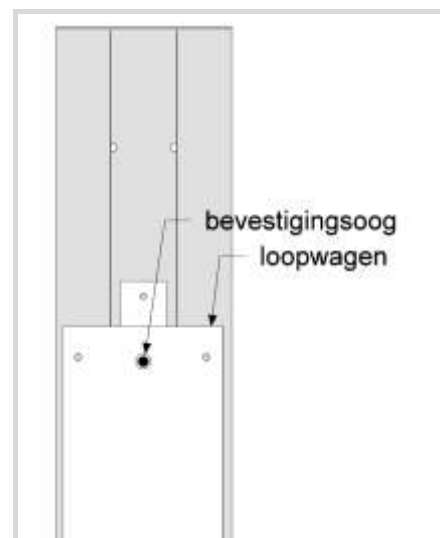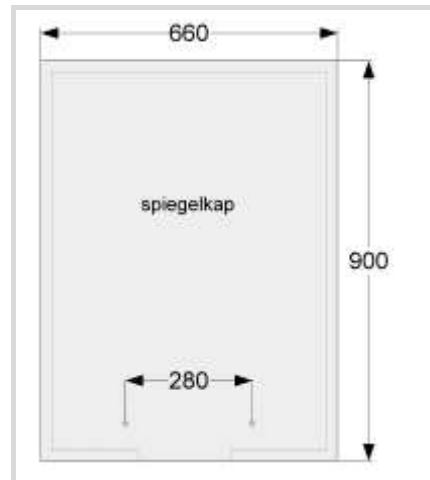

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.

Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

\* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.