

Montagevoorstel *

Rugsteun kantelbaar

Artikelnummering:

732000 (RVS gepolijst) / 733000 (RVS gepolijst)

Kies de bevestigingswijze afbeelding 1, 2 of 3 en volg de instructies

AFBEELDING 1 Bevestiging op de wand:

1. Bepaal de breedte maat van de rugsteun en zet de inbusschroefjes vast met de inbussleutel.
De breedte maat van de flenzen hart op hart is minimaal 55 cm en maximaal 65 cm.
2. - teken de boorgaten voor de twee langwerpige flenzen af
3. - breng voor de door u gekozen bevestigingsmaterialen boorgaten aan
- zet de flenzen vast voorzien van de meegeleverde kapringen
- meegeleverde afdekkappen aanbrengen
4. Schuif het rugdeel met aan de onderzijde het kantelmechanisme over de buisjes en zet vast met inbussleutel op de juiste diepte



AFBEELDING 2 Bevestiging op de flenzen van de toiletbeugels:

Ruimte tussen de wandbeugels is hart op hart minimaal 60 cm en maximaal 70 cm!

Deze rugsteun kan op de bevestigingsopeningen van de JadaCare wandbeugel worden vastgezet.

1. Verwijder de afdekkappen en houtdraadbouten uit de bevestigingsopeningen van de wandflenzen van de toiletbeugels
2. plaats de flenzen van de rugsteun op de flenzen van toiletbeugels en zet deze één voor één vast met de houtdraadbouten, kapringen en afdekkappen.
3. Schuif het rugdeel met aan de onderzijde het kantelmechanisme over de buisjes en zet vast met inbussleutel op de juiste diepte




AFBEELDING 3 Bevestiging rugsteun op toiletbeugels Rail-in systeem:

Hiervoor zijn speciale wandflenzen met zijbevestiging benodigd

1. Schuif het rugdeel met aan de onderzijde het kantelmechanisme over de buisjes en zet vast met inbussleutel op de juiste diepte

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep. Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.

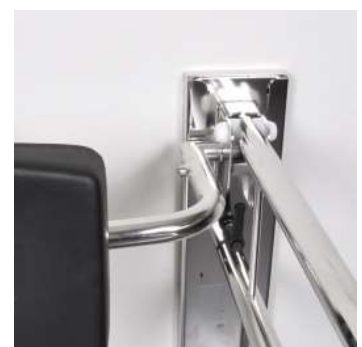

Indien gewenst kan het rugdeel vastgezet worden zodat kanteling niet mogelijk is. Het kussen is 3 cm hoogte instelbaar door aan de achterzijde de schroeven los te draaien, het kussen te verplaatsen en de schroeven weer vast te draaien.