

## Montagevoorstel \*

Vaste verhoger 6 en 10 cm

Artikelnummering:

784600 en 784000



### Vaste verhoger

1. kunststof adapters eerst in de bevestigingsopeningen van het closet aanbrengen
2. montage-deel vastzetten met bijgeleverd bevestigingsset;
  - 2 RVS bouten, samen met opvulling, aanbrengen door bevestigingsgaten
  - op iedere bout een kunststof volgving plaatsen
  - RVS volgving plaatsen
  - 2 RVS moeren M8 aanbrengen en vastdraaien

#### ATTENTIE:

overige kunststofbevestiging niet gebruiken! Zie tekening

3. verhoger vastzetten, zie gebruiksaanwijzing in verpakking verhoger

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.  
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

\* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.