
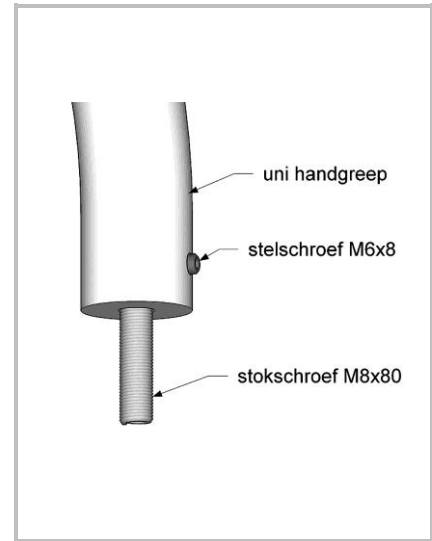


Montagevoorstel *

Bevestigingsset handgreep uni

Artikelnummering:
910002 (RVS)

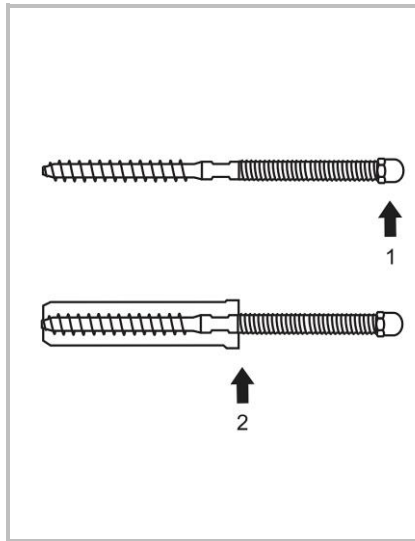

Bevestigingsset

1. plaats van handgreep bepalen
2. de uiteinden van de buis rondom aftekenen
3. in het hart van de afgetekende rondjes boren met 8 mm boor en pluggen aanbrengen
4. verzinkte dopmoer M6 op het einde van de stokschroef (M6*80) draaien, zie 1, en deze in de plug aanbrengen
5. met behulp van deze dopmoer de stokschroeven doordraaien in de plug tot aan het schroefdraad, zie 2
6. dopmoer van de stokschroef verwijderen
7. de handgreep plaatsen op de stokschroeven en vastzetten met het stelschroefje M6x8.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.