

Montagevoorstel *

Glijstuk handdouchehouder

Artikelnummering:

970000



Glijstuk handdouchehouder éénhandig te bedienen

Attentie: Geschikt voor buis Ø 25 mm

1. zorg dat de glijstang ontkoppeld is
2. druk de borgknop goed in zodat de glijstang hier gemakkelijk doorheen glijdt
3. schuif voorzichtig het glijstuk over de buis en zet deze vast door de borgknop los te laten

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.