


## Montagevoorstel \*

Douchezitting opklapbaar rug / armleggers nokkenas

### Artikelnummering:

970006 douchezitting maatwerk (RVS gepolijst) / 970006C douchezitting maatwerk (RVS wit)

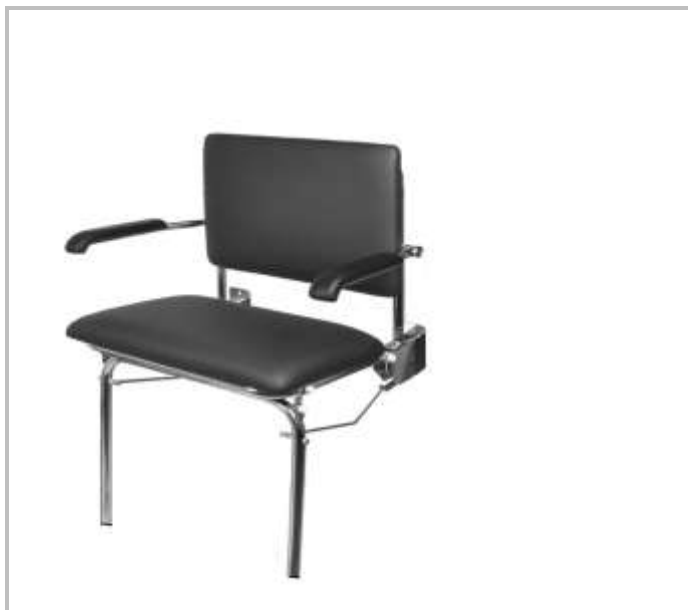

### Douchezitting opklapbaar

- 1 bepaal de juiste zithoogte, boorgaten aftekenen
- 2 4 gaten boren, voor de door u gekozen bevestigingsmaterialen en pluggen aanbrengen
- 3 De meegeleverde kapkringen (M8) en de door u gekozen bevestigingsmaterialen in de flenzen aanbrengen
- 4 bevestigingsmaterialen vastdraaien
- 5 afdekkappen aanbrengen

#### Tip:

- het vastzetten van de wandflenzen gaat eenvoudig en snel met een zogenaamde ratelring-steeksleutel SW 13 (zie afbeelding) indien u houtdraadbouten M8 gebruikt.
- Na gebruik de douchezitting drogen. Let op dat het rug- en zitdeel elkaar niet raken. Altijd iets ruimte er tussen laten zodat de delen goed kunnen luchten.

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.  
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

\* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.