

Montagevoorstel *

Fixatieset wastafelverstelset

Artikelnummering:

999107B(IN)

- Stukjes tape aanbrengen zoals aangegeven, de beschermstrips kunnen blijven zitten
- Mocht er al een handdouchehouder geplaatst zijn, verwijder dan eerst de stelschroef 8x16, waarmee de houder vastzit
- Om meer ruimte te creëren kan men de 4 stelschroeven van de 2 kokerprofielen losdraaien
- Draai de 2 fixatiebouten in de draadbusjes, achterop de console, waarbij de bout met verbindingsmoer op de plaats komt waar de handdouchehouder zich bevindt
- Zodra de 2 fixatiebouten links en rechts aangebracht zijn, eerst de 4 stelschroeven weer vastzetten



- De bout met verbindingsmoer nu zover aandraaien, zodat de handdouchehouder goed vast komt te zitten
- Indien er geen handdouchehouder aanwezig is, kan men volstaan met de bout gewoon een stukje in het draadbusje te draaien
- Draai daarna 1 moer M8 richting draadbusje om de bout te borgen
- Hierna kan de verbindingsmoer uitgedraaid worden richting muur/tegel, om dmv de kartelknop het geheel te fixeren



- Nadat ook de andere fixatiebout is uitgedraaid tegen de muur/tegel, en de console stabiel is, dient men de moeren M8 uit te draaien zodat de verbindingsmoer geborgd wordt. Zie afbeelding.
- Zo ook met de moer m8 op de andere fixatiebout



* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.