




Montagevoorstel * serie 120

Wandbeugel antislip, anti-allergie, koude intolerantie



Artikelnummering:

120045 (RVS gepolijst) / 120050 (RVS gepolijst) / 120060 (RVS gepolijst) / 120070 (RVS gepolijst)

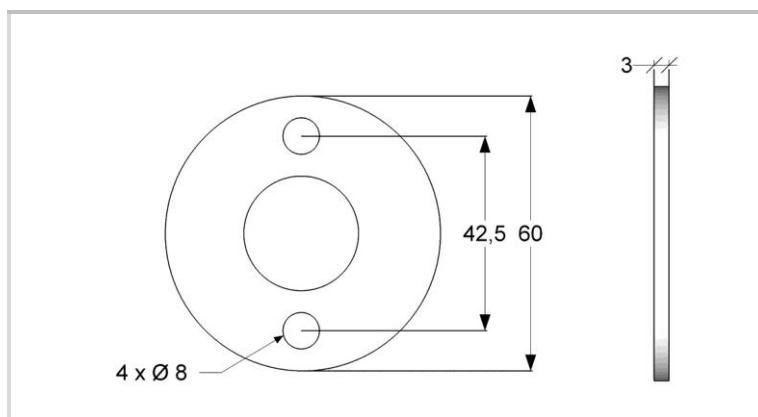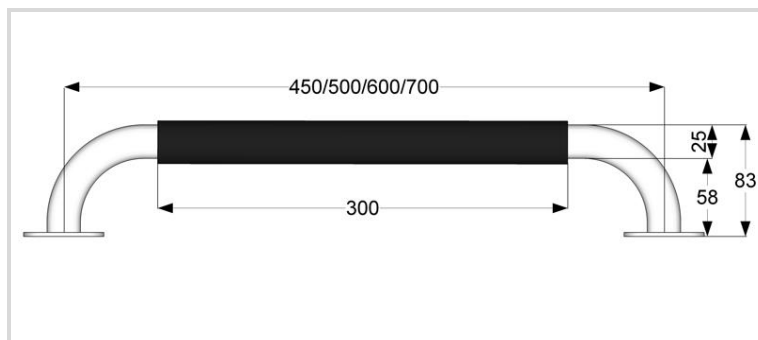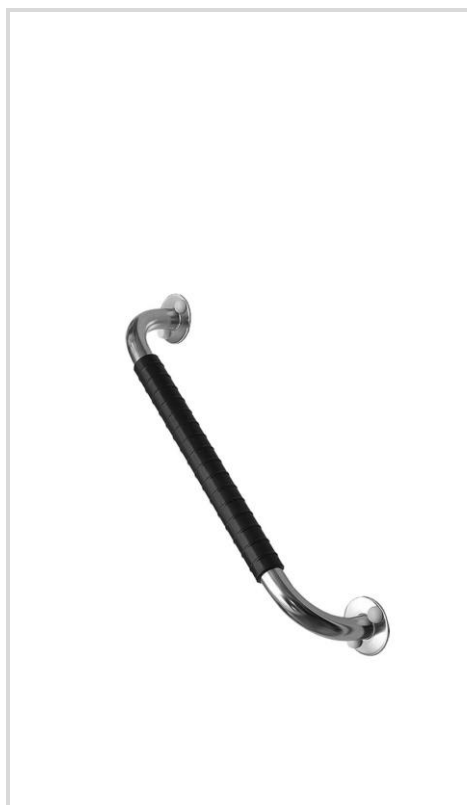

Wandbeugel voorzien van kunststof grip / ommanteling

1. bepaal de juiste positie en teken de boorgaten af
2. breng voor de door u gekozen bevestigingsmaterialen boorgaten aan
3. zet de wandbeugel vast met de bevestigingsmaterialen voorzien van de meegeleverde kappingen
4. meegeleverde afdekkapjes aanbrengen

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep. Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik

Uitgave mei-20