



Montagevoorstel * serie 160

Wastafelbeugel

Artikelnummering:

160045(C/SC)/160070(C/SC)/160075(C/SC)/160077(C/SC)/160082(C/SC)


6 cijferig nummer = RVS gepolijst / 6 cijferignummer+C = RVS wit / 6 cijferignummer+ SC = staal wit

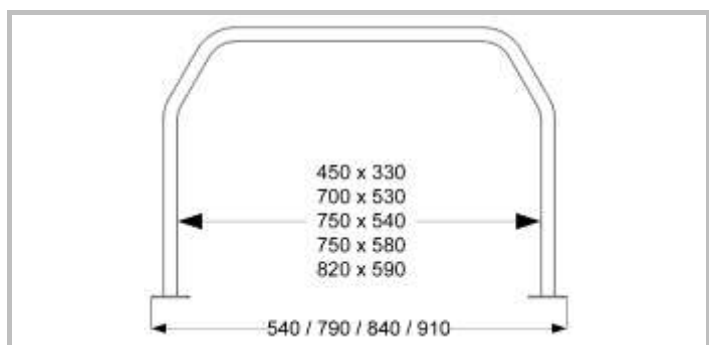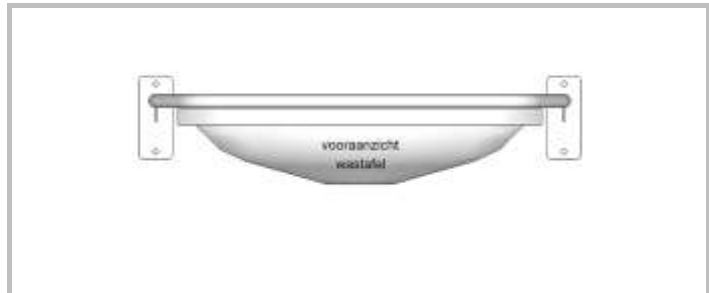

Wastafelbeugel

Opmerking: aanbevolen hoogte wastafelbeugel is onderkant beugel gelijk aan bovenkant wastafel (de beugel steekt iets boven de wastafel uit)

1. wastafelbeugel horizontaal tegen muur plaatsen en gaten aftekenen
2. breng voor de door u gekozen bevestigingsmaterialen boorgaten aan
3. zet de wastafelbeugel vast met de door u gekozen bevestigingsmaterialen voorzien van de meegeleverde kapringen
4. meegeleverde afdekkapjes aanbrengen

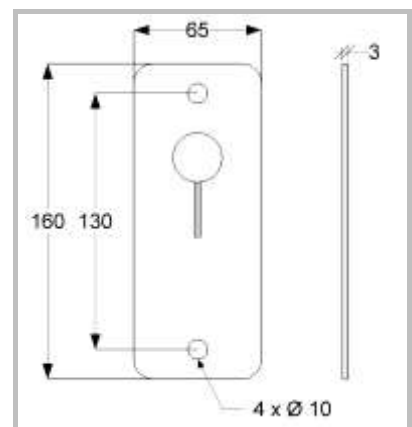

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep. Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik